

Plum Eyewash

Elsősegély szemkimosó

A Plum elsősegély szemkimosó 0,9%-os steril sóoldatot tartalmaz, mely megegyezik a szemfolyadék természetes sótartalmával. Ez az izotóniás oldat alkalmas a szembalesetek utáni azonnali öblítéshez. A flakonok ergonomikus kupakja biztosítja, hogy az öblítőfolyadék lágy, és egyenletes sugárban érje a szemeket.

A Plum elsősegély szemkimosó alkalmas idegen testek, szennyeződések (például por, piszok, fém és fa szilánkok, stb), sőt egyes vegyszerek, például olajok és oldószerek öblítéséhez is. A baleset bekövetkeztekor azonnal meg kell kezdeni a szemöblítést - elkerülve, hogy az idegen anyagok a szemben ragadjanak, maradandó sérülést okozva.

Nyomja össze enyhén a flakont öblítés közben! A DUO flakonok speciális kialakítása lehetővé teszi a két szem egyidejű öblítését is.

Szemkimosóink orvosi eszközöknek minősülnek, az EU 92/42/EEC irányelve alapján.

Tulajdonságok:

- Magas szintű funkcionalitás: a flakonokat a DIN EN 15154-4 minősítésnek megfelelően állítják elő.
- Rugalmas megoldás: a flakonok több méretben is elérhetőek, mozgó munkaállomásokon is alkalmazhatóak, de akár szemkimosó állomás részeként a falra is felszerelhetőek.
- Széleskörű felhasználási lehetőségek (pl. az ipari szektorban, laboratóriumokban, elsősegély készlet részeként, mobil alkalmazásra járművekben, stb.)
- Egyszerűen kezelhető - a sérült személy egyedül, segítség nélkül is használhatja a szemkimosókat.
- Zárt állapotban a termék szavatossági ideje 3 év
- A flakonok nem igényelnek karbantartást, sem a folyadék cseréjét.



Kiszerezés:

Úrtartalom	200 ml	500 ml	500 ml DUO	1000 ml DUO
Cikkszám	4691	4604	4861	4800
Öblítési idő	kb. 2 perc	kb. 5 perc	kb. 2 perc / szem	kb. 5 perc / szem
Méretek	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm

További információt a weboldalainkon talál, vagy lépjen kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségeken